

# 新型コロナウイルス 抗原キット販売中

税込 **5,500円** (1回分)

**迅速5分で  
判定**




## アルソニック®COVID-19 Ag 操作方法

**1** 検体抽出液を飛び散らせないようにアルミシールをはがします。



**2** 検体を採取した滅菌綿棒を検体抽出液に浸し、滅菌綿棒を回しながら上下に動かして数回攪拌します。

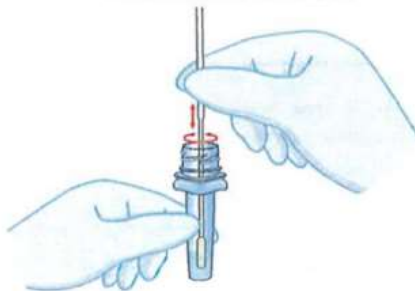

**3** 滅菌綿棒を引き出し、検体抽出容器にノズル(フィルター付き)をしっかり取り付けます。



### テストプレートに3滴滴下



5分後判定

※テストプレートには判定時間が記載されていません。

陽性		再検査	
陰性		再検査	

判定時間は試料滴下後5分です。試料滴下後5分経過後も判定ライン(T)が認められない場合、陰性と判定して下さい。(必ず確認ライン(C)の出現を確認して下さい。)